



The Pink Pad® AIR ASSIST™

Guía de uso rápido


01. Inflado/desinflado

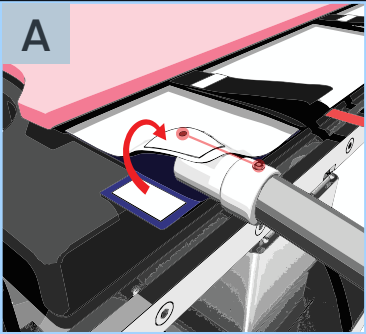


Inserte la manguera de aire y alinee los conectores

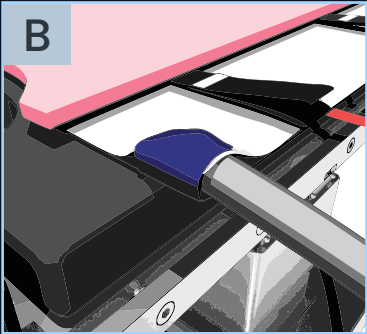

Asegure la manguera de aire

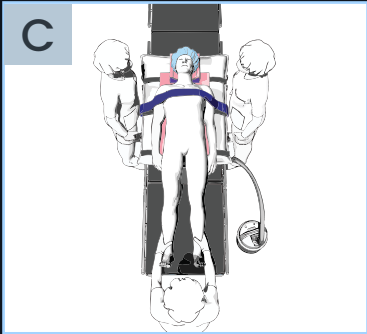


Asegúrese de que el personal de quirófano esté ubicado en todos los lados de la mesa quirúrgica

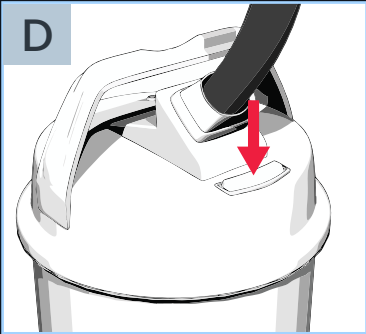


Active la unidad Power Lift para inflar, desactive para desinflar


02. Traslado y posicionamiento del paciente

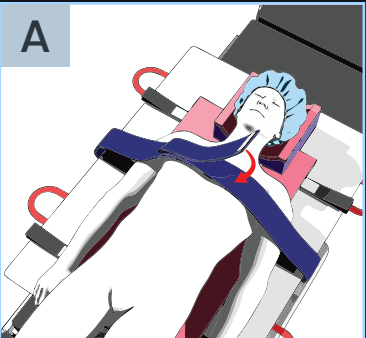


Ajuste de forma floja la correa de traslado del paciente

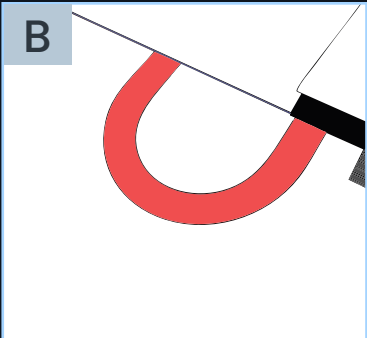

Sujete firmemente las asas de traslado

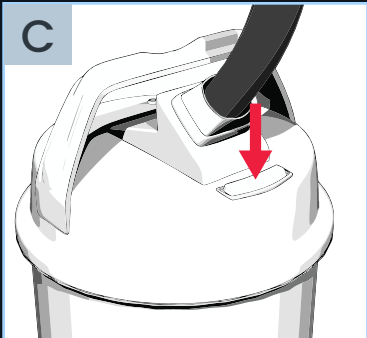


Asegúrese de que la unidad Power Lift esté activada

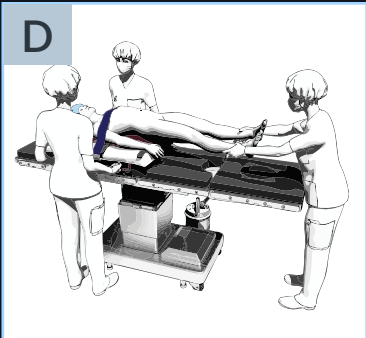


Sostenga los pies o las piernas del paciente. Desactive la unidad Power Lift cuando se alcance la posición deseada


03. Fije la mesa quirúrgica mediante correas

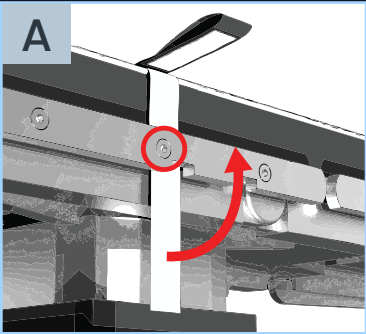


Pase la correa inferior por detrás del riel de la mesa, cerca de un perno del riel

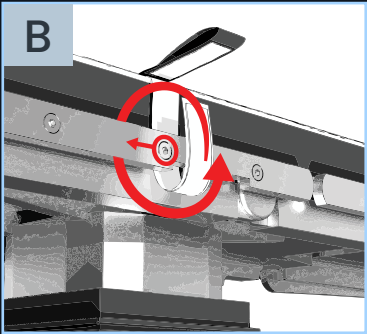

Pase la correa inferior alrededor del riel de la mesa, opuesto al perno del riel

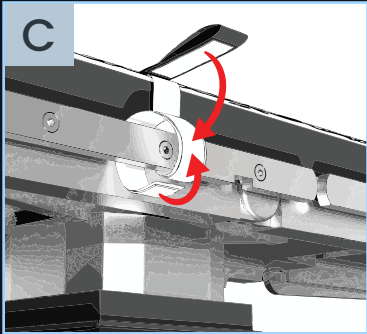


Fije con seguridad ambos extremos de la correa

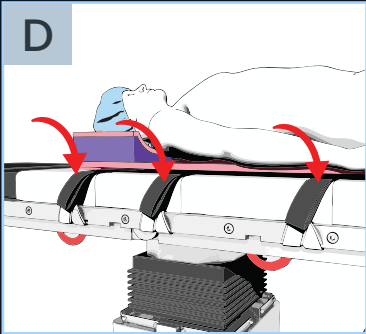


Importante
Todas las correas para rieles de mesa deben estar sujetas a la mesa quirúrgica antes de realizar el procedimiento/posicionamiento del paciente


04. Posicionamiento del paciente

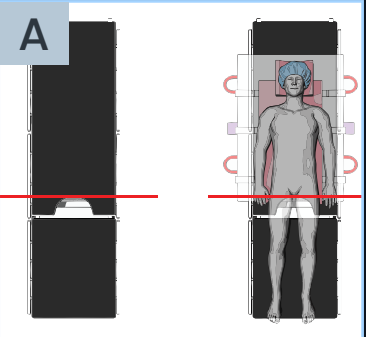


Coloque al paciente en la posición deseada sobre la mesa quirúrgica

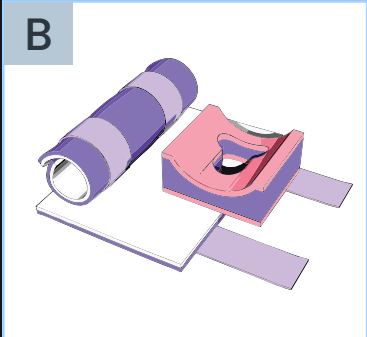

Asegure la colocación adecuada de las soluciones de posicionamiento

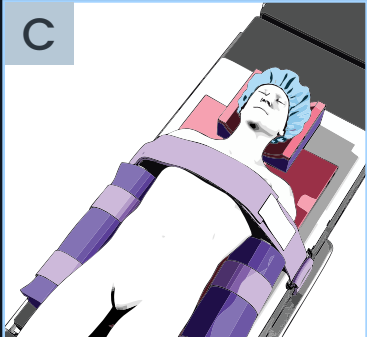

Asegure la correa para el cuerpo compatible con la piel a los rieles de la mesa quirúrgica y colóquela sobre el paciente

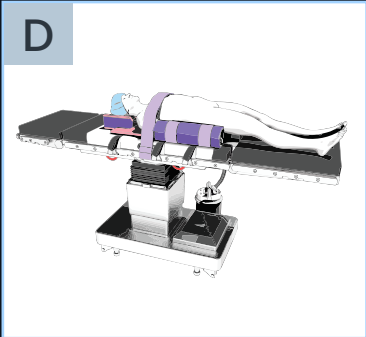

Evalúe el posicionamiento del paciente según el protocolo hospitalario antes del procedimiento

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

 xodusmedical.com/eifu	Consultar las instrucciones electrónicas de uso
	Fabricante
	Límite de humedad
	Límite de temperatura
	Marcado CE
	MedEnvoy Switzerland Gotthardstrasse 28 6302 Zug Switzerland

	Sin esterilizar
	Conductor de protección
	Corriente alterna
	Dispositivo médico
	Sin látex
 (Pink Pad Air Assist)	Emergo Europe Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem The Netherlands

	Precaución
	Proteger de la humedad
	Parte aplicada tipo BF
	Recolección separada
	No reutilizar
 (Air Assist Power Lift)	Obelis S.A. Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brussels, BELGIUM Tel: 32(0)2 732 5954 Email: mail@obelis.net