

Istruzioni per l'uso: Poggiatesta per sedia medica

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI.

DESCRIZIONE

Il Poggiatesta per sedia da spiaggia medica di Xodus Medical è un poggiatesta a base di schiuma da utilizzare nella posizione per sedia da spiaggia medica per le procedure chirurgiche di artroscopia della spalla.

INDICAZIONI

Il Poggiatesta per sedia da spiaggia medica è un dispositivo monouso non sterile da utilizzare nelle procedure chirurgiche.

FINALITÀ E UTENTE

Questo dispositivo è destinato all'uso da parte di operatori sanitari qualificati esclusivamente per mantenere la posizione della testa del paziente durante le procedure chirurgiche di artroscopia della spalla.

CONTROINDICAZIONI

Questo dispositivo non è progettato, venduto o destinato ad un uso diverso da quanto qui indicato.

CONOSCENZA E UTILIZZO


L'uso professionale richiede la conoscenza di queste istruzioni per l'uso. L'uso del dispositivo si limita alla sala operatoria chirurgica di un ospedale o di un centro chirurgico.

BENEFICI CLINICI

Fornisce appoggio e stabilità alla testa durante la procedura chirurgica di artroscopia della spalla su sedia da spiaggia medica.


Poggiatesta Vista interna

(Contatto paziente qui)

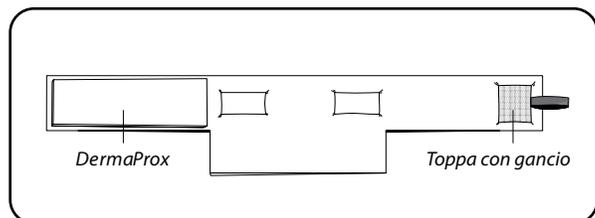


Poggiatesta Vista esterna






(Rivolto dalla parte opposta rispetto al paziente)

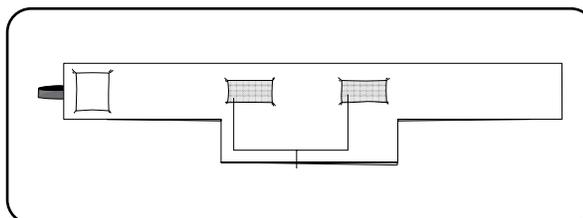

Sottogola

(Sul mento del paziente)

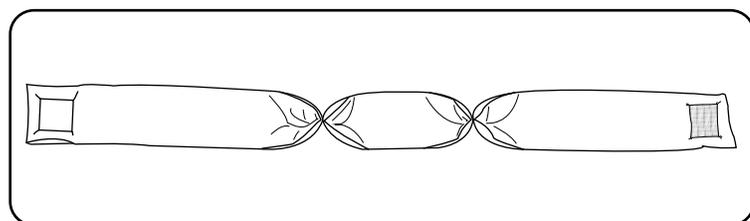

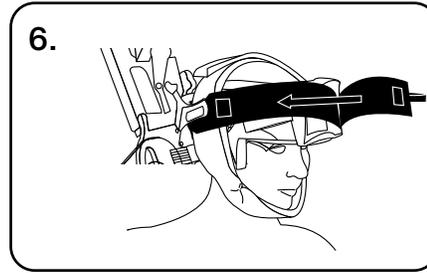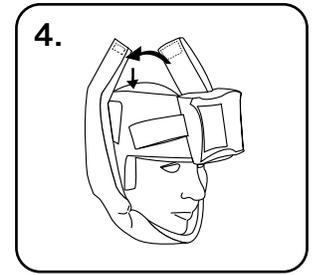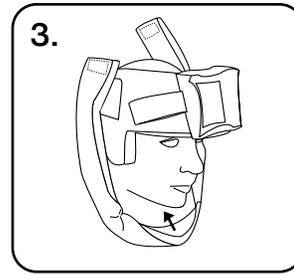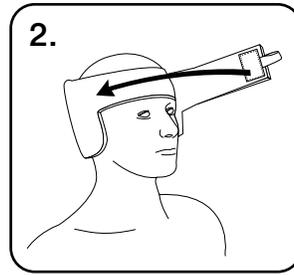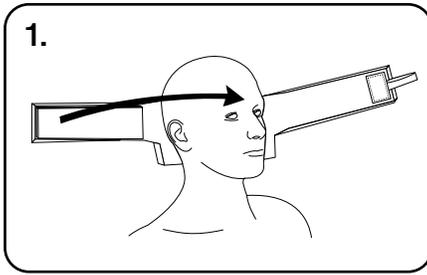

PREPARAZIONE E UTILIZZO

1. Centrare la parte interna del poggiatesta sulla parte posteriore della testa del paziente. Posizionare la cinghia con il cuscinetto DermaProx sulla fronte del paziente in modo che il cuscinetto poggi contro la fronte.
2. Posizionare la cinghia con la toppa con gancio sopra la cinghia con il cuscinetto DermaProx.
3. Posizionare il sottogola sul mento come mostrato, centrando la parte del cinturino tra le due arricciature.
4. Posizionare il lato con la chiusura a strappo rivolto lontano dalla sommità della testa del paziente, quindi chiudere il lato rimanente del sottogola fissando saldamente la chiusura a strappo.
5. Posizionare la testa del paziente nel gruppo testa della poltrona da spiaggia, collegando i quadrati a strappo del poggiatesta a quelli del gruppo testa.
6. Chiudere la cinghia della sedia da spiaggia medica sopra il poggiatesta, fissando la chiusura a strappo della cinghia della sedia da spiaggia medica al poggiatesta.

SMALTIMENTO

- Dopo l'uso, il Poggiatesta per sedia da spiaggia medica deve essere smaltito in conformità con la politica ospedaliera.

AVVERTENZE

- Non stringere eccessivamente il Poggiatesta per sedia da spiaggia medica.
- Questo dispositivo è stato progettato, testato e prodotto esclusivamente per l'uso su un singolo paziente. Il riutilizzo o il ricondizionamento di questo dispositivo può provocarne il guasto o conseguenti lesioni.
- Il ricondizionamento di questo dispositivo può creare un rischio di contaminazione e infezione del paziente.
- Non riutilizzare o ricondizionare questo dispositivo.
- Dopo l'uso, il Poggiatesta per sedia da spiaggia medica deve essere smaltito in conformità con la politica ospedaliera.
- Il Poggiatesta per sedia da spiaggia medica deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto a temperatura ambiente prima dell'uso. Evitare l'esposizione prolungata a temperature elevate.
- Si prega di ispezionare visivamente per verificare la presenza di eventuali violazioni dell'integrità dell'imballaggio prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato, aperto o rotto.

PRECAUZIONI

- Il Poggiatesta per sedia da spiaggia medica deve essere utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso e con eventuali controindicazioni, avvertenze o precauzioni fornite dal produttore del relativo strumento.
- Comunicare all'utente e/o al paziente che qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato all'autorità competente del Paese in cui si trova l'utente e/o il paziente, nonché a Xodus Medical e al suo rappresentante autorizzato.

SPECIFICHE TECNICHE

- I materiali di fabbricazione includono:
 - » Schiuma poliuretana
 - » Nylon
- Periodo di validità - Indefinito

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO, TRASPORTO E FUNZIONAMENTO

- Il Poggiatesta per sedia da spiaggia medica deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto a temperatura ambiente prima dell'uso. Evitare l'esposizione prolungata a temperature elevate.



Attenzione!
Consultare i
documenti di
accompagnamento



Dispositivo
medico



xodusmedical.com/elfu

Consultare le
istruzioni per l'uso
o consultare le
istruzioni per l'uso in
formato elettronico



Non riutilizzare



Non realizzato
con lattice di
gomma naturale



Non utilizzare
se la confezione
è danneggiata
o aperta



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Amhem
The Netherlands



702 Prominence Drive
New Kensington, PA 15068,
United States

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com
Tel: 1+724-337-5500

REGISTRAZIONE FDA
CERTIFICATO ISO 13485



PRODOTTO NEGLI
STATI UNITI

LITIFUBC006 R1 7/30/2024