

Pink Hip Kit™ - H & DermaProx™ Boot Liner - H

Postless Hip Positioning System

Enhetsbeskrivning

Pink Hip Kit - H är utformad för att användas med Hana® Table och förhindrar att patienten rör sig på OR-bordet under artroskopiska höftoperationer.


Pink Hip Kit - H får endast användas en gång och skall kasseras efter det kirurgiska ingreppet är klart.

Pink Hip Kit - H (Figur 1) består av följande komponenter:

- A. Huvudlägesställare (1)
- B. Pink Hip Pad (1)
- C. Kroppsrem (1)
- D. Lyftduk (1)
- E. Armbordsremmar (1 par)
- F. Armbordsdynor (1 par)
- G. Kulledsskydd (2)

Pink Hip Kit - H och DermaProx Boot Liners - H består av: Pink Hip Kit - H komponenter ovan samt följande:

- H. DermaProx™ Boot Liner (1 par)

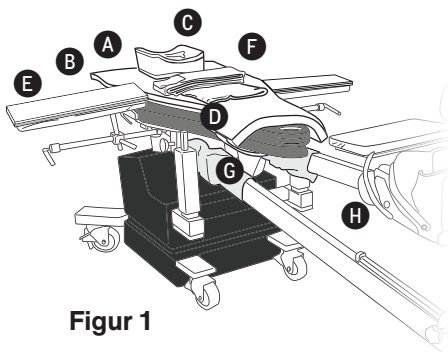

Figur 1

Avsedda användare

Pink Hip Kit - H är avsett att användas av sjukvårdspersonal i enlighet med dessa bruksanvisningar. Användningsmiljön är en professionell sjukvårdsinrättning.

Avsedd användning

Pink Hip Kit - H är designad för att användas med Hana® Table och förhindrar rörelse av patienten på bordet under artroskopiska höftoperationer.

DermaProx Boot Liners - H är designade för att användas med Hana Table för att hjälpa till att dämpa och skydda foten när dragkraft appliceras, och minimera fot- och hälgliedning under höftledsartroskopi.

Indikationer för användning

Pink Hip Kit och DermaProx Boot Liner - H är indicerade för användning för att placera patienter under artroskopiska höftoperationer.

Målpatientgrupper

Patientpopulationen består av patienter för vilka en höftledsartroskopisk procedur bedöms vara nödvändig av operationskirurgen.

Kontraindikationer

- Inga

Varningar

- Det är vårdgivarens ansvar att vara bekant med produktens bruksanvisning samt utbildning av relevant vårdpersonal.
- Produktanvändning utanför indikationer eller avsedd användning är förbjuden. Ändringar av produkten kan ändra förväntade resultat.

Försiktighetsåtgärder

- Inspektera produktförpackningen innan den öppnas. Om produktförpackningen är skadad eller punkterad, **ANVÄND INTE**.
- Inspektera produkten och innehållet när den tas ur förpackningen. Om produkten är skadad eller defekt, **ANVÄND INTE** och kontakta omedelbart tillverkaren för support.
- Var försiktig när du placerar kirurgiska patienter. Dra inte patienter över ytan på Pink Hip Pad, om du gör det kan det leda till produktskador och funktionsförlust.

Instruktioner


1. Placera Pink Hip Pad vid perinealdelen av bordet så att Pink Hip Pad kommer i direkt kontakt med bordsytan (Figur 2). Placera de vita kardborrbanden på undersidan av Pink Hip Pad så att dekalen "Denna sida upp" är vänd uppåt.

Figur 2



2. Fäst de vita kardborrbanden på den kirurgiska sängens räcken genom att föra dem i en slinga under skenan och fästa ihop kardborrbandets ändar. (Figur 3)
3. Fäst den lila remmen under operationsbordet genom att först placera den längre änden av remmen under bordet, och överlappa sedan den längre änden av remmen med den kortare änden. Se till att trycka dit det vita krok materialet i remmens kortare ände ordentligt på remmens längre ände för att fästa den ordentligt. (Figur 4)

Figur 3

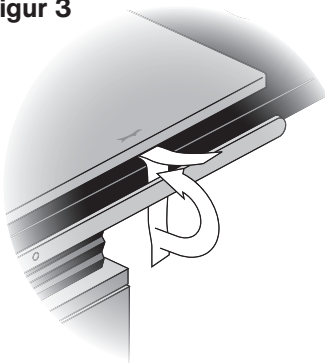

4. Lägg lyftduken över dynan, centrerat mellan kardborrbanden, så som visas. Lyftduken ska endast täcka den del av dynan som är vänd mot patientens rygg mellan skulderbladen och korsbenet (Figur 1).
5. Placera huvudlägesställaren ovanför Pink Hip Pad™ på en plats som är lämplig för patientens huvudpositionering.

Figur 4


Vy från under bordstillbehöret



Lila dynremmar fästa vid bordet

6. Överför patienten till Pink Hip Pad. Placera patienten enligt följande:
 - Patientens främre övre iliac-rygggrad (ASIS) ska placeras direkt på justeringsflikarna. (Figur 5)
 - Se till att axlarna inte sträcker sig förbi den övre kanten av Pink Hip Pad för att maximera hudkontakten.
 - Huden i det scapulära området och korsbenet måste komma i kontakt med ytan på Pink Hip Pad.
 - Använd vid behov lyftduken för att försiktigt LYFTA upp patienten från Pink Hip Pad för att flytta om den. Dra inte patienten på dynan. Se till att Pink Hip Pad förblir platt hela tiden.


Figur 5

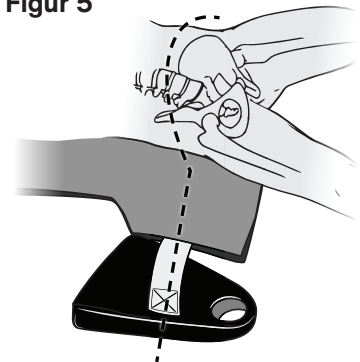

Rikta in ASIS med den nedre remmen på Pink Hip Pad

7. Om tillämpligt, sätt patientens fötter i DermaProx™ Boot Liners enligt följande:
 - a. Upprätta korrekt orientering av stövfodret. Den sydda kanten anpassas efter patientens fot. (Figur 6)
 - b. Öppna kardborrbandets förslutningsremmar och skjut det öppna stövfodret över patientens fot i rätt riktning. (Figur 7)
 - c. Stäng remmarna på stövfodret över patientens fot och se till att det vita krok materialet är ordentligt fastsatt. Passformen ska vara tät utan att påverka blodcirkulationen. (Figur 7)
 - d. Upprepa steg a-c för återstående fot.


Figur 6

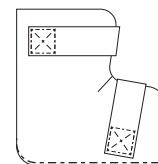


Den sydda kanten är i linje med fotsulan.

8. Placera armbordsdynorna på armborden på OR-bordet.
9. Placera patientens armar på armbordsdynorna med handflatorna uppåt och fäst med armbordsremmarna (Figur 9).

Figur 7

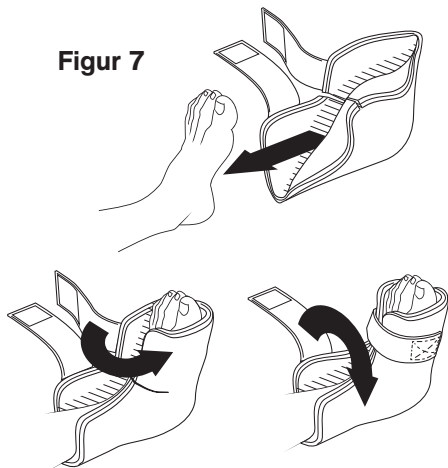


Figur 8

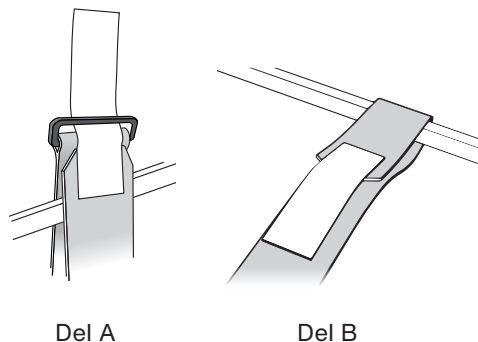

Figur 9

Avslutad installation med korrekt placerad patient.

10. Fäst kroppsremmen (Figur 8) enligt följande:
 - a. Börja med *del A*, orientera remmen så att den lilla kardborrutan är vänd utåt. Mata remmen genom spännet tills det sitter ordentligt på tillbehörsskenan och lägg över patienten.
 - b. Fortsätt med *del B*. Dra upp änden på remmen mellan bordet och tillbehörsskenan. Se till att det långa vita kardborrbandet är vänt inåt. Pressa ihop det vita kardborrbandet för att fästa det på plats.

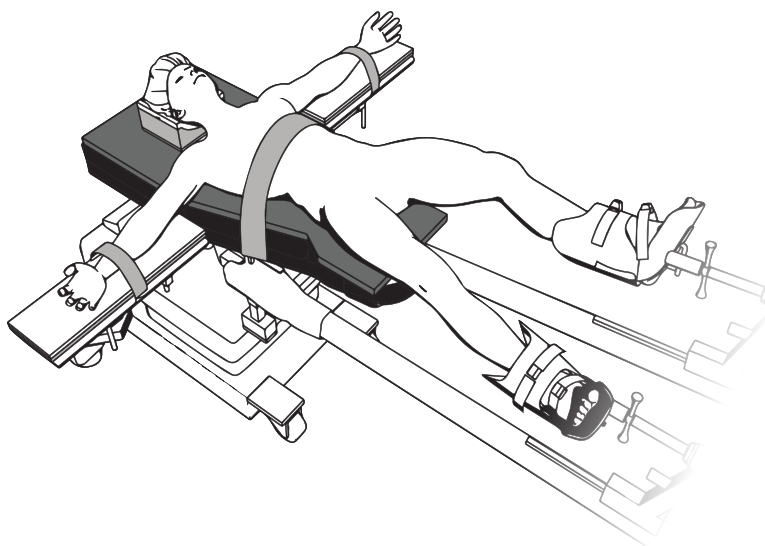

Symbolordlista

	Medicinsk utrustning
	Varning
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Batchkod

	Använd inte om förpackningen är skadad
	Återanvänd inte
	Ingen latex
	Kvantitet
	Katalognummer

	Se elektronisk bruksanvisning
	locke steril
	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Europeisk överensstämmelse

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITFUPP036 R2 8/31/2022