

Pink Hip Kit™ - H & DermaProx™ Boot Liner - H

Sistema de posicionamento do quadril sem pilar

Instruções
de utilização

Descrição do Dispositivo

O Pink Hip Kit - H foi desenvolvido para ser usado com a mesa Hana® e evita o movimento do doente na mesa de cirurgia durante procedimentos artroscópicos do quadril.

O Pink Hip Kit - H é de utilização única e deve ser eliminado após a conclusão do procedimento cirúrgico.

O Pink Hip Kit - H (*Figura 1*) contém os seguintes componentes:

- A. Apoio de cabeça (1)
- B. Pink Hip Pad (1)
- C. Alça de corpo (1)
- D. Lençol de elevação (1)
- E. Alças de placa do braço (1 par)
- F. Almofadas de placa do braço (1 par)
- G. Cobertura da junta esférica (2)

O Pink Hip Kit - H e os DermaProx Boot Liners - H são compostos por: Os componentes Pink Hip Kit - H acima e ainda:

- H. DermaProx™ Boot Liner (1 par)

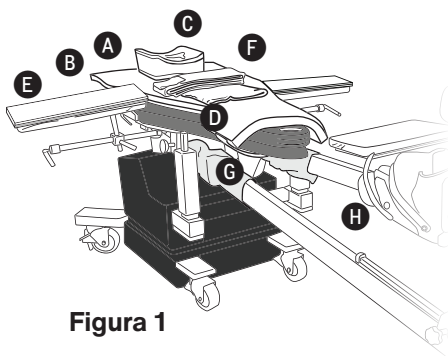


Figura 1

Utilizadores previstos

O Pink Hip Kit - H destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde de acordo com estas instruções de utilização. O ambiente de utilização é um estabelecimento de saúde profissional.

Utilização Prevista

O Pink Hip Kit - H foi concebido para ser utilizado com a mesa Hana® e impede o movimento do doente na mesa durante procedimentos artroscópicos do quadril.

Os DermaProx Boot Liners - H foram concebidos para serem usados com a mesa Hana para ajudar a amortecer e a proteger o pé quando a tração é aplicada e a minimizar o deslizamento do pé e do calcanhar durante procedimentos artroscópicos do quadril.

Instruções de utilização

O Pink Hip Kit e o DermaProx Boot Liner - H são indicados para uso no posicionamento de doentes durante procedimentos artroscópicos do quadril.

Grupos de doentes alvo

A população de doentes é composta por doentes para os quais um procedimento artroscópico do quadril é considerado necessário pelo cirurgião.

Contra-indicações

- Nenhuma

Avisos

- É da responsabilidade do profissional de saúde familiarizar-se com as instruções de utilização do produto, bem como dar formação ao pessoal de saúde relevante.
- A utilização do produto não conforme às indicações ou contrária à utilização prevista é proibido. Modificações no produto podem alterar os resultados esperados.

Precauções

- Inspeccione a embalagem do produto antes de abrir. Se a embalagem do produto estiver danificada ou perfurada, **NÃO UTILIZE O PRODUTO**.
- Inspeccione o produto e o conteúdo ao removê-los da embalagem. Se o produto estiver danificado ou com defeito, **NÃO O UTILIZE** e contacte imediatamente o fabricante para obter suporte.
- Tenha cuidado ao posicionar doentes cirúrgicos. Não arraste os doentes na superfície da Pink Hip Pad, pois isso pode resultar em danos no produto e perda de função.

Instruções


1. Coloque a Pink Hip Pad na secção perineal da mesa para que a Pink Hip Pad faça contacto direto com a superfície da mesa (*Figura 2*). Posicione as alças de fecho tipo velcro brancas na parte inferior da Pink Hip Pad de forma que a etiqueta “This Side Up” fique voltada para cima.

Figura 2



2. Prenda as alças de tipo velcro brancas aos trilhos da cama cirúrgica enrolando sob o trilho e juntando as pontas do fecho tipo velcro. (*Figura 3*)
3. Sob a mesa cirúrgica, colocar primeiro a extremidade mais longa das alças roxas sob a mesa e, em seguida, sobreponha a extremidade mais longa da alça com a ponta mais curta da alça. Certifique-se de que pressiona o material branco do gancho da extremidade mais curta da alça firmemente na extremidade mais longa da alça para prendê-la no lugar. (*Figura 4*)

Figura 3

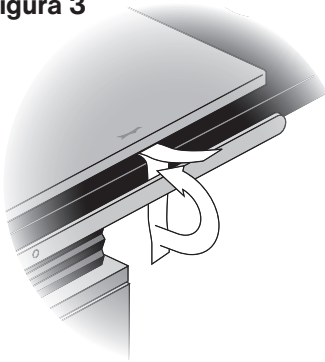

4. Coloque o lençol de levantamento sobre a almofada, centrado entre as alças de fecho tipo velcro, conforme mostrado. O lençol de elevação deve cobrir apenas a parte da almofada que se destina à parte inferior das costas do doente, entre abaixo da omoplata e acima do sacro. (*Figura 1*).
5. Coloque o apoio de cabeça na Pink Hip Pad™ numa localização que seja suficiente para o posicionamento da cabeça do doente.

Figura 4


Vista da parte inferior da mesa



Alças de almofada roxa fixadas na mesa

6. Transfira o doente para a Pink Hip Pad. Posicione o doente da seguinte forma:
 - A espinha íliaca antero-superior (ASIS) do doente deve ser posicionada diretamente nas alças inferiores. (*Figura 5*)
 - Certifique-se de que os ombros não ultrapassam a borda superior da Pink Hip Pad para maximizar o contacto com a pele.
 - A pele da região dos ombros e o sacro devem estar em contacto com a superfície da Pink Hip Pad.
 - Se necessário, utilize o lençol de elevação para LEVANTAR cuidadosamente o doente da Pink Hip Pad para reposicionar. Não arraste o doente na almofada. Certifique-se de que a Pink Hip Pad permanece sempre plana.


Figura 5

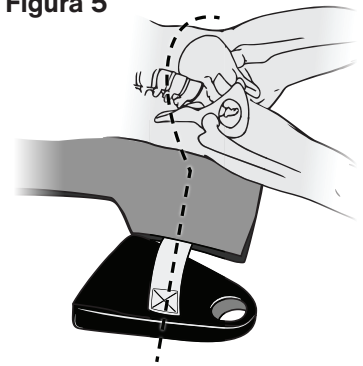

Alinhe o ASIS com a alça inferior da Pink Hip Pad

7. Se for o caso, coloque os pés do doente nos DermaProx™ Boot Liners da seguinte forma:
 - a. Estabeleça a orientação adequada do boot liner. A borda costurada ficará alinhada com a sola do pé do doente. (*Figura 6*)
 - b. Abra as alças e deslize o boot liner aberto sobre o pé do doente na orientação adequada. (*Figura 7*)
 - c. Feche as alças do boot liner sobre o pé do doente e certifique-se de que o material do fecho branco fica bem preso. O ajuste deve ser confortável sem impedir a circulação. (*Figura 7*)
 - d. Repita as etapas a-c para o outro pé.

Figura 6

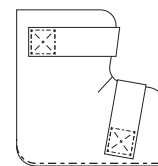

A borda costurada alinha-se com a sola do pé.

8. Coloque as almofadas de placa do braço nas almofadas de placa da mesa de cirurgia.
9. Coloque os braços do doente nas almofadas de placa do braço com as palmas para cima e prenda com as alças de placa do braço (Figura 9)

Figura 7

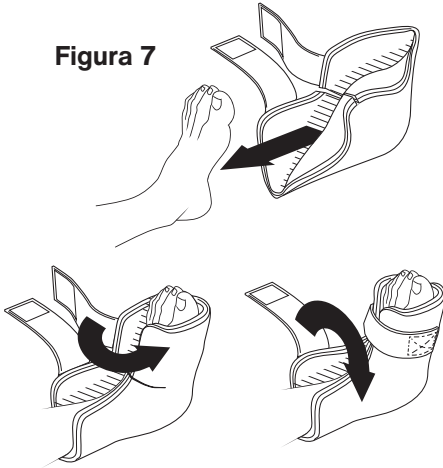


Figura 8


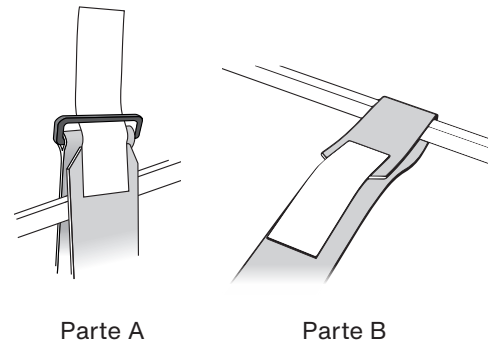


Figura 9

Configuração concluída com o doente posicionado corretamente.

10. Prenda a alça do corpo (Figura 8) da seguinte forma:
 - a. Começando com a Parte A, oriente a alça de forma que o fecho tipo velcro branco fique voltado para fora. Passe a alça pela fivela até que esteja ajustada ao trilho de acessórios e coloque-a sobre o doente.
 - a. Continuando com a Parte B, puxe para cima a extremidade da alça entre a mesa e o trilho de acessórios, garantindo que o fecho longo tipo velcro branco fica voltado para dentro. Pressione o fecho tipo velcro branco para prender no lugar.

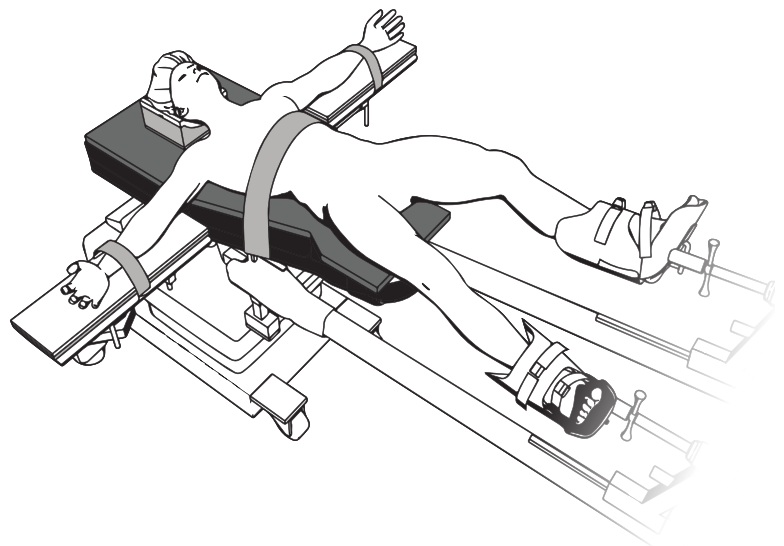

Glossário de símbolos

	Dispositivo médico
	Cuidado
	Fabricante
	Data de fabrico
	Código do lote

	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Não reutilizar
	Sem látex
	Quantidade
	Número de catálogo

	Consulte as instruções de utilização eletrônicas
	Não estéril
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Conformidade Europeia

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITFUPP042 R2 8/31/2022