

Pink Hip Kit™ - H & DermaProx™ Støvelinnlegg - H

Frittstående Hofteposisjonering System

Beskrivelse av enheten

Pink Hip Kit - H er designet for å brukes sammen med Hana®-bordet og forhindrer at pasient beveger på seg på bordet under artroskopiske hofteprosedyrer.


Pink Hip Kit - H er ment for engangsbruk og må avhendes etter at den kirurgiske prosedyren er fullført.

Pink Hip Kit - H (Figur 1) består av følgende komponenter:

- A. Hodestøtte (1)
- B. Pink Hip Pad (1)
- C. Kroppsstropp (1)
- D. Trekkklaken (1)
- E. Armstøttestropp (1stk)
- F. Armstøttepute (1stk)
- G. Kuleledddeksel (2)

Pink Hip Kit - H og DermaProx Støvelinnlegg - H består av: Pink Hip Kit - H-komponentene ovenfor samt følgende:

- H. DermaProx™ Støvelinnlegg (1stk)

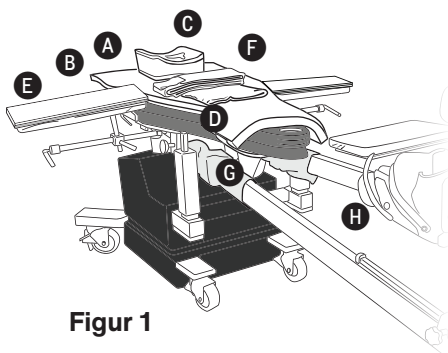

Figur 1

Tiltenkte brukere

Pink Hip Kit - H er ment for å brukes av helsepersonell i samsvar med denne bruksanvisningen. Bruksmiljøet er profesjonelle helseinstitusjoner.

Bruksområde

Pink Hip Kit - H er designet for å brukes sammen med Hana®-bord, for hindrer at pasienten beveger på seg på bordet under artroskopiske hofteprosedyrer.

DermaProx Støvelinnlegg - H er designet for å brukes sammen med Hana-bordet for å hjelpe til med å polstre og beskytte foten når det påføres trekkraft, og minimere fot- og hælglidning under hofteartroskopi.

Indikasjoner for bruk

Pink Hip Kit og DermaProx Støvelinnlegg - H is indikert for bruk for å posisjonere pasienter under artroskopiske hofteprosedyrer.

Pasientmålgrupper

Pasientpopulasjonen består av pasienter der en artroskopisk hofteprosedyre har blitt fastslått å være nødvendig av kirurg.

Kontraindikasjoner

- Ingen

Advarsler

- Det er helsepersonellens ansvar å gjøre seg kjent med produktets IFU-er samt for opplæringen av relevant helsepersonell.
- Bruk av produktet utenom indikasjoner eller tiltenkt bruk er forbudt. Endringer på produktet kan føre til endringer i det forventede resultatet.

Forholdsregler

- Kontroller produktemballasjen før den åpnes. Hvis produktemballasjen er skadet eller punktert, **IKKE BRUK** produktet.
- Kontroller produktet og innholdet når det tas ut av emballasjen. Hvis produktet er skadet eller defekt, **IKKE BRUK** produktet og ta kontakt umiddelbart med produsenten for bruker støtte.
- Vær forsiktig når du posisjonere kirurgiske pasienter. Ikke dra pasienter over overflaten på Pink Hip Pad, da dette kan føre til skader på produktet og tap av funksjon.

Instruksjoner


1. Plasser Pink Hip Pad ved perinealdelen av bordet slik at Pink Hip Pad kommer i direkte kontakt med bordets overflate (*Figur 2*). Posisjoner de hvite borrelåsstroppene på undersiden av Pink Hip Pad slik at "This Side Up" merket vender oppover.

Figur 2



2. Fest de hvite borrelåsstroppene til sideskinnene på det kirurgiske bordet ved å føre dem under skinnen og feste endene på borrelåsen sammen. (*Figur 3*)
3. Fest den lille stroppen under det operasjonsbordet ved først å plassere den lengste enden av de lille stroppene under bordet, etterfulgt av en overlappning av den lange enden av stroppen med den korte enden av stroppen. Sørg for å presse det hvite krok materialet på den korte enden av stroppen fast på den lengste enden av stroppen, for å feste den. (*Figur 4*)

Figur 3

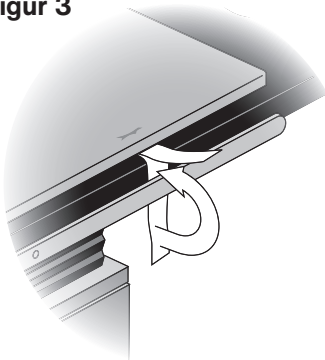

4. Legg trekkklakenet over puten, sentrert mellom borrelåsstroppene som anvist. Trekkklakenet skal kun dekke den delen av puten som vil komme i kontakt med den nederste delen av pasientens rygg - nedenfor scapulaeområdet og ovenfor Sacrum (*Figur 1*).
5. Plasser hodestøtten over Pink Hip Pad™ i en posisjon som er egnet til pasientens hodeplassering.

Figur 4


Sett fra undersiden av bord



Lilla putestropp festet til bordfestet

6. Flytt pasienten over på Pink Hip Pad. Posisjoner pasienten på følgende måte:
 - Pasientens "anterior superior iliac" ryggrad (ASIS) skal plasseres direkte på nedre stroppene. (*Figur 5*)
 - Forsikre deg om at skuldrene ikke ligger over den øvre kanten av Pink Hip Pad, for å maksimere hudkontakten.
 - Huden i scapularområdet og sacrum må være i kontakt med overflaten på Pink Hip Pad.
 - Om nødvendig bruk trekkklakenet til å LØFTE pasienten forsiktig opp fra Pink Hip Pad, for å endre på posisjonen. Ikke dra pasienten over puten. Forsikre deg om at Pink Hip Pad til enhver tid forblir flat.


Figur 5

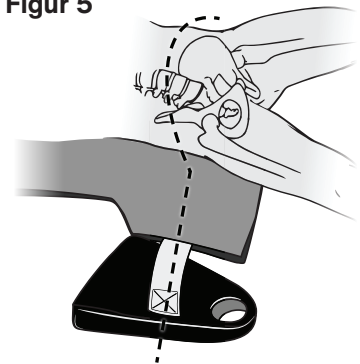

Juster ASIS med den nedre stroppen på Pink Hip Pad

7. Hvis aktuelt, legg pasientens føtter i DermaProx™ støvelinnlegg på følgende måte:
 - a. Forsikre deg om at støvelinnlegget er riktig plassert. Den sydde kanten skal ligge under fotsålen på pasientens fot. (*Figur 6*)
 - b. Åpne stroppene med borrelås og skyv det åpne støvelinnlegget inn over pasientens fot i riktig retning. (*Figur 7*)
 - c. Lukk stroppene på støvelinnlegget rundt pasientens fot og sørg for at det hvite krok materialet sitter godt festet. Passformen skal være tettsittende uten å forhindre sirkulasjonen. (*Figur 7*)
 - d. Gjenta trinn a-c for motsatt fot.


Figur 6

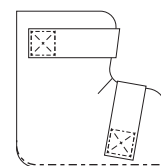


Sømkanten skal ligge under fotsålen.

8. Plasser armstøtteputene på armstøttene på OR-bordet.
9. Plasser pasientens armer på armstøtteputene med håndflatene opp og fest dem med armstøttestroppene (Figur 9).

Figur 7

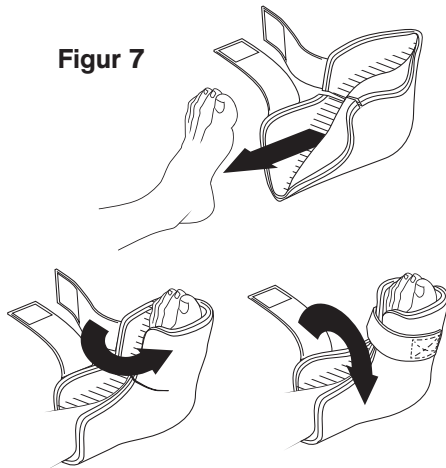


Figur 8

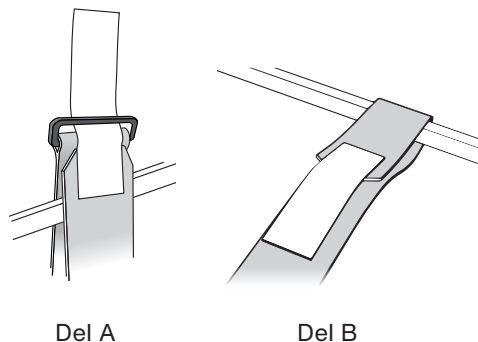

Figur 9

Fullfør plasseringen når pasienten er i riktig posisjon.

10. Fest kroppstroppen (figur 8) på følgende måte:
 - a. Begynn med *del A*, og plasser stroppen slik at det hvite borrelåsmaterialet vender utover. Før stroppen gjennom spennen og stram til den sitter godt festet på sideskinnen, og legg den løse enden over pasienten.
 - b. Fortsett med *del B*, trekk enden av stroppen opp mellom bordet og sideskinnen, og sørg for at det lange hvite borrelåsmaterialet vender innover. Press det hvite borrelåsmaterialet sammen for å feste det på plass.

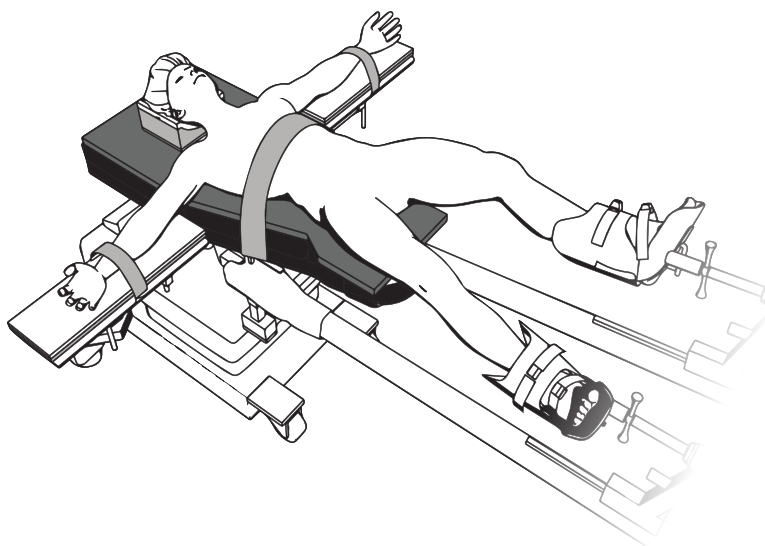

Symbolordliste

	Medisinsk enhet
	Forsiktig
	Produsent
	Produksjonsdato
	Batchkode

	Må ikke brukes hvis forpakningen er skadet
	Ikke ment for gjenbruk
	Inneholder ikke lateks
	Mengde
	Katalognummer

	Se bruksanvisning på nettet
	Ikke-steril
	Autorisert representant i Det europeiske fellesskapet
	Europeisk konformitet

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP043 R2 8/31/2022