

# Pink Hip Kit™ - H und DermaProx™ Bootliner - H

Gebrauchsanweisung

Pfostenfreies Hüftpositionierungssystem

## Produktbeschreibung

Das Pink Hip Kit - H wurde für die Verwendung mit dem Hana®-Tisch entwickelt und verhindert die Bewegung des Patienten auf dem OP-Tisch bei arthroskopischen Hüftoperationen.

Das Pink Hip Kit - H ist zum Einmalgebrauch bestimmt und wird nach Abschluss des chirurgischen Eingriffs entsorgt.

Das Pink Hip Kit - H (Abbildung 1) besteht aus folgenden Komponenten:

- A. Kopfstütze (1)
- B. Pink Hip Pad (1)
- C. Körpergurt (1)
- D. Hebetuch (1)
- E. Armlagergurte (1 Paar)
- F. Armlagerpad (1 Paar)
- G. Kugelgelenkabdeckung (2)

Das Pink Hip Kit - H und der DermaProx Bootliner - H bestehen aus: Den Komponenten des Pink Hip Kit - H oben sowie den Folgenden:

- H. DermaProx™ Bootliner (1 Paar)

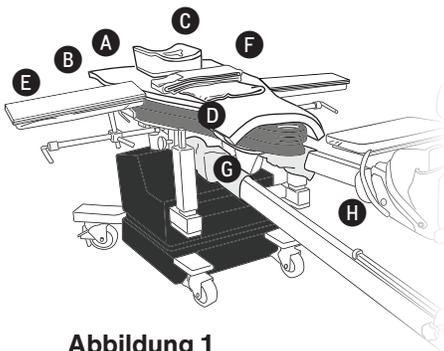


Abbildung 1

## Vorgesehene Anwender

Das Pink Hip Kit - H ist zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal gemäß dieser Gebrauchsanweisung bestimmt. Die Nutzungsumgebung ist eine professionelle Gesundheitseinrichtung.

## Verwendungszweck

Das Pink Hip Kit - H ist für die Verwendung mit dem Hana®-Tisch bestimmt und verhindert Bewegungen des Patienten auf dem Tisch bei arthroskopischen Hüftoperationen.

Die DermaProx Bootliner - H wurden für die Verwendung mit dem Hana-Tisch entwickelt, um den Fuß bei Zuganwendung zu polstern und zu schützen und das Abrutschen von Fuß und Ferse bei Hüftarthroskopieverfahren zu minimieren.

## Gebrauchsanweisung

Das Pink Hip Kit und der DermaProx Bootliner - H sind zur Positionierung von Patienten bei arthroskopischen Hüftoperationen indiziert.

## Patientenzielgruppen

Die Patientenpopulation besteht aus Patienten, bei denen der operierende Chirurg eine arthroskopische Hüftoperation für notwendig erachtet.

## Kontraindikationen

- Keine

## Warnhinweise

- Es liegt in der Verantwortung des Gesundheitsdienstleisters, sich mit der Gebrauchsanweisung des Produkts vertraut zu machen und das entsprechende Gesundheitspersonals zu schulen.
- Das Produkt darf ausschließlich gemäß den Indikationen oder dem Verwendungszweck verwendet werden. Änderungen am Produkt können die erwarteten Ergebnisse verändern.

## Vorsichtshinweise

- Überprüfen Sie die Produktverpackung vor dem Öffnen. Wenn die Produktverpackung beschädigt oder durchstoßen ist, **DAS PRODUKT NICHT VERWENDEN**.
- Produkt und Inhalt nach der Entnahme aus der Verpackung überprüfen. Wenn das Produkt beschädigt oder defekt ist, dürfen Sie es **NICHT VERWENDEN**. Wenden Sie sich sofort an den Hersteller, um Unterstützung zu erhalten.
- Bei der Positionierung von Chirurgiepatienten ist Vorsicht angezeigt. Ziehen Sie Patienten nicht über die Oberfläche des Pink Hip Pad, da dies zu Produktschäden und Funktionsverlust führen kann.

# Anleitung


1. Platzieren Sie das The Pink Hip Pad am Dammbereich des Tisches, so dass The Pink Hip Pad direkten Kontakt mit der Tischoberfläche hat (*Abbildung 2*). Positionieren Sie die weißen Klettbänder an der Unterseite des The Pink Hip Pad so, dass das Schild „This Side Up“ (Diese Seite nach oben) nach oben zeigt.

**Abbildung 2**



2. Befestigen Sie die weißen Klettbänder an den OP-Bettschienen, indem sie unter die Schiene geschlungen und die Enden der Klettbänder befestigt werden. (*Abbildung 3*)
3. Unter dem OP-Tisch befestigen, dafür zuerst das längere Ende der violetten Gurte unter den Tisch platzieren und dann das längere Ende des Gurts mit dem kürzeren Gurtende überlappen. Darauf achten, das weiße Hakenmaterial des kürzeren Gurtendes fest auf das längere Gurtende zu drücken, um es zu befestigen. (*Abbildung 4*)

**Abbildung 3**

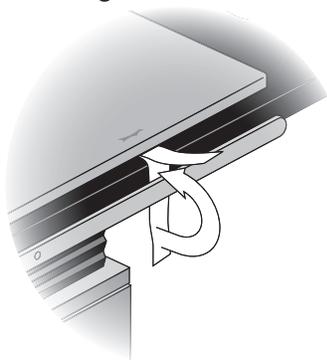

4. Legen Sie das Hebetuch wie abgebildet mittig zwischen die Klettbänder über das Polster. Das Hebetuch sollte nur den Teil des Pads bedecken, der für das Kreuz des Patienten (zwischen den Schulterblättern und dem Kreuzbein) vorgesehen ist. (*Abbildung 1*).
5. Legen Sie den Kopfpositionierer auf das Pink Hip Pad™ an eine Stelle, die für die Platzierung des Kopfes des Patienten ausreichend ist.

**Abbildung 4**

Ansicht von unter dem Tisch



Lila Polstergurte, die am Tisch befestigt sind.

6. Transferieren Sie den Patienten auf das Pink Hip Pad. Positionieren Sie den Patienten wie folgt:
  - Die Spina iliaca anterior superior (ASIS) des Patienten sollte direkt auf den unteren Bändern positioniert werden. (*Abbildung 5*)
  - Stellen Sie sicher, dass die Schultern nicht über die obere Kante des Pink Hip Pad hinausragen, um den Hautkontakt zu maximieren.
  - Die Haut der Schulterregion und des Kreuzbeins muss die Oberfläche des Pink Hip Pad berühren.
  - Verwenden Sie bei Bedarf das Hebetuch, um den Patienten vorsichtig vom Pad abzuheben und neu zu positionieren. Ziehen Sie den Patienten nicht auf das Pad. Stellen Sie sicher, dass das Pink Hip Pad immer flach bleibt.


**Abbildung 5**



Richten Sie die ASIS mit dem unteren Gurt des Pink Hip Pad aus.

7. Legen Sie gegebenenfalls die Füße des Patienten in den DermaProx™ Bootliner und zwar wie folgt:
  - a. Stellen Sie die richtige Ausrichtung des Bootliners sicher. Die genähte Kante wird auf die Fußsohle des Patienten ausgerichtet. (*Abbildung 6*)
  - b. Öffnen Sie die Bänder und schieben Sie den offenen Bootliner in der richtigen Ausrichtung über den Fuß des Patienten. (*Abbildung 7*)
  - c. Schließen Sie die Bänder des Bootliners über dem Fuß des Patienten und stellen Sie sicher, dass das weiße Klettbandmaterial sicher befestigt ist. Die Passform sollte eng sein, ohne die Durchblutung zu beeinträchtigen. (*Abbildung 7*)
  - d. Wiederholen Sie die Schritte a bis c für den verbleibenden Fuß.


**Abbildung 6**

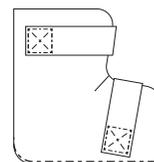


Die genähte Kante wird auf die Fußsohle ausgerichtet.

8. Legen Sie die Armlagerpads auf die Armlager des OP-Tisches.
9. Legen Sie die Arme des Patienten mit den Handflächen nach oben auf die Armlagerpads und sichern Sie sie mit den Armlagergurten (*Abbildung 9*)

**Abbildung 7**

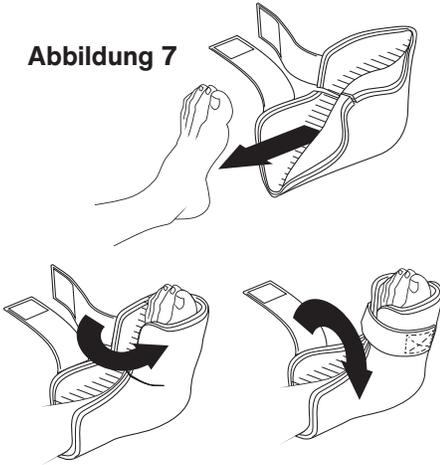


**Abbildung 8**

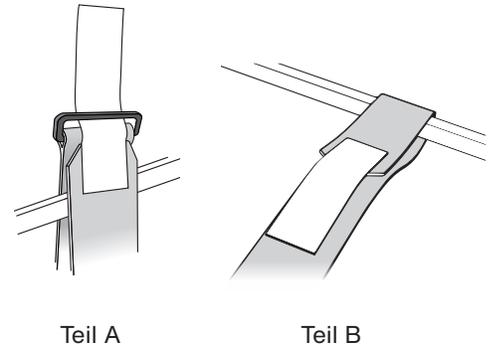

10. Befestigen Sie den Körpergurt (*Abbildung 8*) wie folgt:
  - a. Richten Sie den Gurt beginnend mit *Teil A* so aus, dass die weiße Hakenseite des Klettbands nach außen zeigt. Führen Sie den Gurt durch die Schnalle, bis er fest an der Zubehörschiene anliegt, und legen Sie ihn über den Patienten.
  - b. Setzen Sie mit *Teil B* fort und ziehen Sie das Gurtende zwischen dem Tisch und der Zubehörschiene nach oben. Achten Sie dabei darauf, dass die Hakenseite des langen weißen Klettbands nach innen zeigt. Drücken Sie die weiße Hakenseite des Klettbands zusammen, um es zu befestigen.

**Abbildung 9**

Abgeschlossene Installation mit richtig positioniertem Patienten.

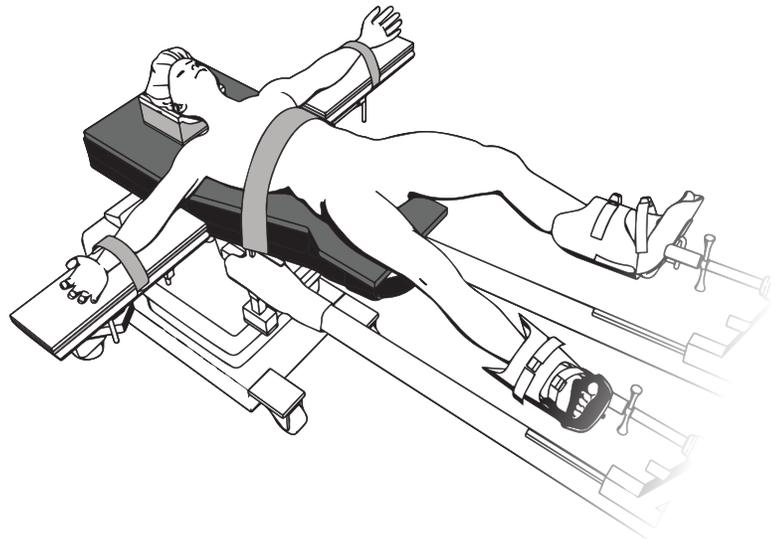

## Symbol-Glossar

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | Medizinprodukt    |
|  | Vorsicht          |
|  | Hersteller        |
|  | Herstellungsdatum |
|  | Chargencode       |

|  |  |
|--|--|
|  | Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist |
|  | Nicht wiederverwenden                            |
|  | Kein Latex                                       |
|  | Menge  |
|  | Katalognummer                                    |

|  |   |
|--|---|
|  | Elektronische Gebrauchsanweisung lesen                      |
|  | Unsteril  |
|  | Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft |
|  | Europäische Konformität                                     |

**XODUS MEDICAL**  
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500  
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com  
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED  
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP044 R2 8/31/2022