

# DermaProx<sup>TM</sup>

# bootliner - S+N

Gebruiksaanwijzing

## Beschrijving van het hulpmiddel

De Smith & Nephew DermaProx bootliners zijn bestemd voor gebruik met het heuppositioneringssysteem.

De Smith & Nephew DermaProx bootliners zijn bestemd voor eenmalig gebruik en worden na de operatie weggegooid.

## Beoogde gebruikers

De Smith & Nephew DermaProx bootliners zijn bedoeld voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing. De gebruiksomgeving is een professionele zorginstelling.

## Beoogd gebruik

De Smith & Nephew DermaProx bootliners dienen voor gebruik met het heuppositioneringssysteem om de voet te beschermen tijdens tractie en om voet- en hielslip tijdens heupartroscopieprocedures tot een minimum te beperken.

## Gebuuksaanwijzing

De Smith & Nephew DermaProx bootliners zijn geïndiceerd voor gebruik tijdens heupartroscopieprocedures.

## Patiëntenpopulatie

De patiëntenpopulatie bestaat uit patiënten bij wie een artroscopische heupoperatie door de behandelend chirurg noodzakelijk wordt geacht.

## Contra-indicaties


- Geen

## Waarschuwingen

- De zorgverlener dient bekend te zijn met de gebruiksaanwijzingen voor het product en te zorgen dat het betreffende medische personeel goed is opgeleid.
- Productgebruik buiten de indicaties of het beoogd gebruik is verboden. Wijzigingen aan het product kunnen de te verwachten resultaten beïnvloeden.

## Voorzorgsmaatregelen

- Inspecteer de verpakking van het product voordat u deze opent. **NIET GEBRUIKEN** als de productverpakking beschadigd of doorboord is.
- Inspecteer het product en de inhoud nadat deze is uitgepakt. **NIET GEBRUIKEN** als het product beschadigd of defect is: neem in dat geval onmiddellijk contact op met de fabrikant voor ondersteuning.

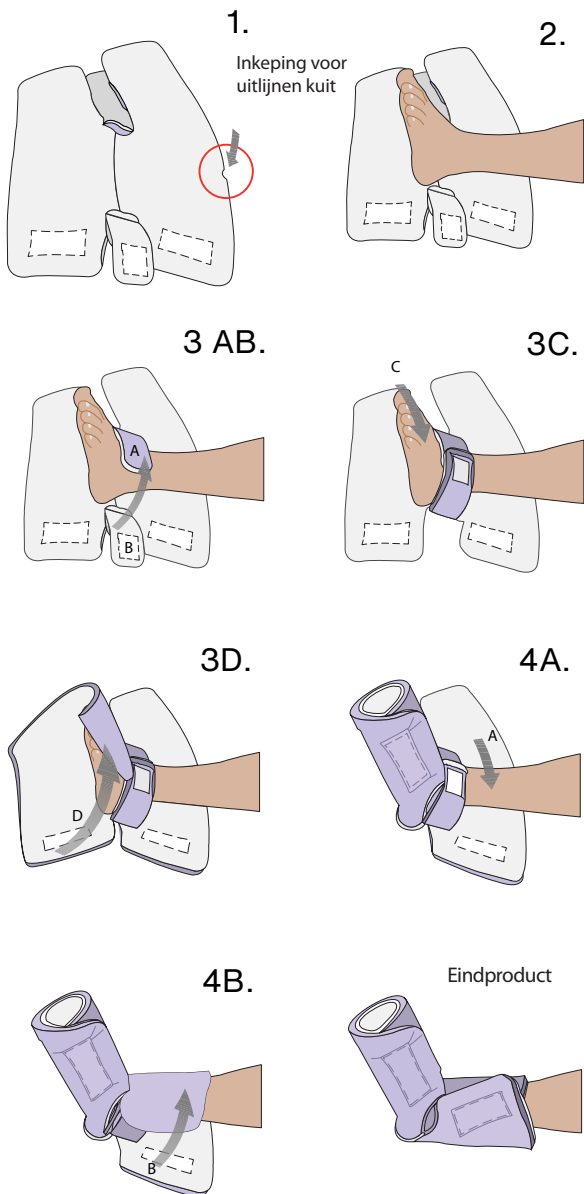

1. Vouw de bootliner open met de witte DermaProx™-laag naar boven.

2. Plaats de hiel van de patiënt in het midden van het kussen zodat de kuit van patiënt over de inkeping ligt.

3A. Leg band A (kant zonder klittenband) van de middelste band op de enkel van de patiënt.

3B. Leg band B (kant met klittenband) van de middelste band over band A zodat de voet van de patiënt omsloten is. Zorg ervoor dat het geheel niet te strak zit.

3C. Wikkel de kant zonder klittenband van het kussen om de tenen van de patiënt.

3D. Wikkel het onderste deel van het kussen om de rest van de tenen van de patiënt en druk het klittenband op de klittenbandvrije kant van het kussen, zodat het bovenste gedeelte van de voet van patiënt omwikkeld is. Zorg ervoor dat het geheel niet te strak zit.

4A. Wikkel de klittenbandvrije kant van het kussen om de kuit van de patiënt.

4B. Wikkel het onderste deel van het kussen om de rest van de kuit van de patiënt en druk het klittenband op de klittenbandvrije kant van het kussen, zodat de voet van de patiënt omwikkeld is. Zorg ervoor dat het geheel niet te strak zit.

*\*Exclusief gedistribueerd door S+N*

## Verklarende woordenlijst symbolen

	Medisch hulpmiddel
	Let op
	Fabrikant
	Productiedatum
	Batchcode

	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
	Niet hergebruiken
	Geen latex
	Hoeveelheid
	Catalogus nummer

	Raadpleeg de elektronische gebruiksaanwijzing
	Niet-steriel
	Gevolmachtigd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Europese conformiteit

**XODUS MEDICAL**  
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500  
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com  
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED  
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP065 R1 1/20/2022