

DermaProxTM

støvleforing - S+N

Brugsanvisning

Enhedsbeskrivelse

Smith & Nephew DermaProx-støvleforinger er designet til at blive brugt sammen med hoftepositioneringssystemet.

Smith & Nephew DermaProx-støvleforinger er til engangsbrug og skal bortskaffes efter gennemførelse af den kirurgiske procedure.

Tiltænkte brugere

Smith & Nephew DermaProx-støvleforinger er beregnet til at blive brugt af sundhedspersonale i overensstemmelse med denne brugsanvisning. Brugsmiljøet er et professionelt sundhedsvæsen.

Anvendelsesformål

Smith & Nephew DermaProx-støvleforinger er designet til at blive brugt sammen med hoftepositioneringssystemet for at hjælpe med at dæmpe og beskytte foden, når der påføres trækraft, og minimere, at foden og hælen skrider under hofteartroskopi.

Indikationer for brug

Smith & Nephew DermaProx-støvleforinger er indiceret til brug under hofteartroskopi procedurer.

Tiltænkte patientgrupper

Patientpopulationen består af patienter, for hvem operationskirurgen vurderer, at en hofteartroskopisk procedure er nødvendig.

Kontraindikationer


- Ingen

Advarsler

- Det er sundhedsudbyderens ansvar at være bekendt med brugsanvisningen for produktet samt uddannelse af relevant sundhedspersonale.
- Produktbrug uden for indikationer eller tilsigtet brug er forbudt. Ændringer af produktet kan ændre de forventede resultater.

Forholdsregler

- Undersøg produktemballagen før åbning. Hvis produktemballagen er beskadiget eller punkteret, må produktet **IKKE** bruges.
- Efterse produktet og indholdet ved fjernelse fra emballagen. Hvis produktet er beskadiget eller defekt, må det **IKKE** bruges. Kontakt straks producenten for at få support.

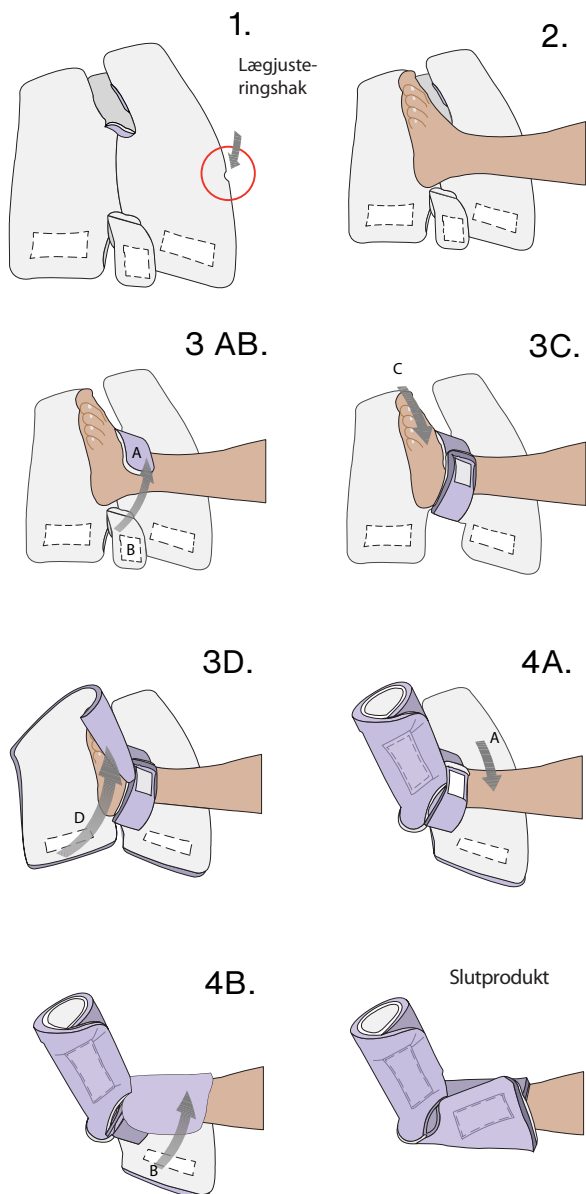

1. Fold støvleforingen ud, og lad det hvide DermaProx™-lag vende opad.

2. Anbring patientens hæl midt på puden, så hakket flugter med patientens læg.

3A. Placer midterremmens rem A (siden uden burrebånd) oven på patientens ankel.

3B. Placer midterremmens rem B (siden med burrebånd) oven på rem A, så patientens fod er pakket ind. Sørg for ikke at overspænde.

3C. Læg den side af puden uden burrebånd rundt om patientens tær.

3D. Læg den nederste halvdel af puden rundt om resten af patientens tær, og placer burrebåndet oven på pudens side uden burrebånd, så det øverste af patientens fod er pakket ind. Undgå at stramme for meget.

4A. Læg den side af puden uden velcro rundt om patientens læg.

4B. Læg den nederste halvdel af puden rundt om resten af patientens læg, og placer velcroen oven på puden uden velcro, så patientens fod er pakket ind. Undgå at stramme for meget.

**Eksklusivt distribueret af S+N*

Ordliste over symboler

	Medicinsk udstyr
	Advarsel
	Producent
	Fremstillingsdato
	Batch-kode

	Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget
	Må ikke genbruges
	Uden latex
	Antal
	Katalognummer

	Se den elektroniske brugsanvisning
	Ikke-steril
	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab
	Europæisk overensstemmelse

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™

702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.



Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP077 R0 1/21/2022