



# INSTRUCTIONS FOR USE: MASCARA PROTECTORA FACIAL DE XODUS MEDICAL

(kit may not contain all products listed below)


## Colocarlo en la Cabeza:

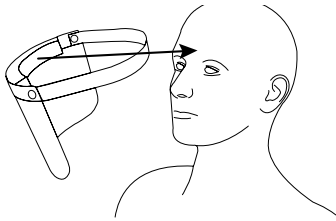

**1.**  
Usando una mano sujetando el escudo donde la correa se encuentra con el escudo, coloque el frente de la espuma contra su frente por encima de las cejas.

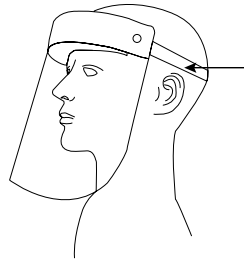


**2.**  
Mientras sostiene la espuma contra su frente, usando la segunda mano, asegure la banda elástica alrededor de la parte posterior de su cabeza para que la espuma descansa en su frente.

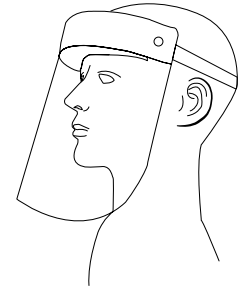

**3.**  
Una vez que la máscara esté situada en una posición cómoda, asegurarse que la máscara cubra la frente y lados de la cara y que no queden áreas sin cubrir.


**4.**  
Ajuste la máscara protectora según sea necesario para mantener en buena posición y cubrimiento.

## Quitarla de la Cabeza:

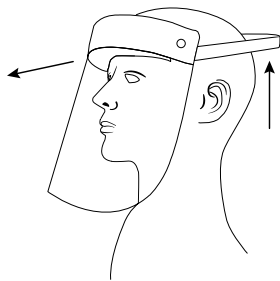

**1.**  
Con una mano, agarre la parte delantera de la máscara protectora en el lugar donde la correa se une con el protector.

**2.**  
Con su segunda mano, agarre la parte posterior de la banda elástica y levante la banda elástica hacia arriba y hacia adelante por encima de su cabeza.

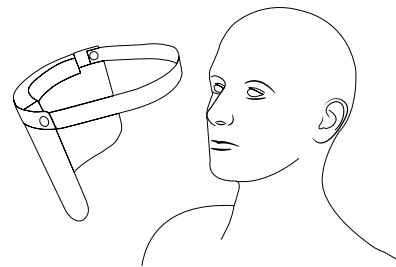

**3.**  
Aleja la máscara de tu cara.

**4.**  
Desechar la máscara de acuerdo al protocolo del hospital para dispositivos

## CUANDO ESTÉ UTILIZANDO SU MÁSCARA FACIAL:

1. Usar la máscara protectora en conjunto con otro equipo de protección personal
2. Reemplaza si la espuma está mojada
3. No exponer a temperaturas altas
4. Manejar con cuidado para prevenir caídas y rasguños en la máscara
5. No Compartir el uso de la máscara
6. Mascara puede ser desinfectada durante un solo uso; la máscara puede ser desinfectada en acuerdo con el protocolo del hospital para este tipo de dispositivo



702 Prominence Drive  
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500  
Fax: 724.337.0555



xodusmedical.com  
info@xodusmedical.com



FDA REGISTERED  
ISO 13485 CERTIFIED



xodusmedical.com/eifu

LITIFUFS002 R1 6/2/2021  
EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands