



# Il Pink® Pad Anti-Trendelenburg Kit

## Istruzioni per l'uso

1.

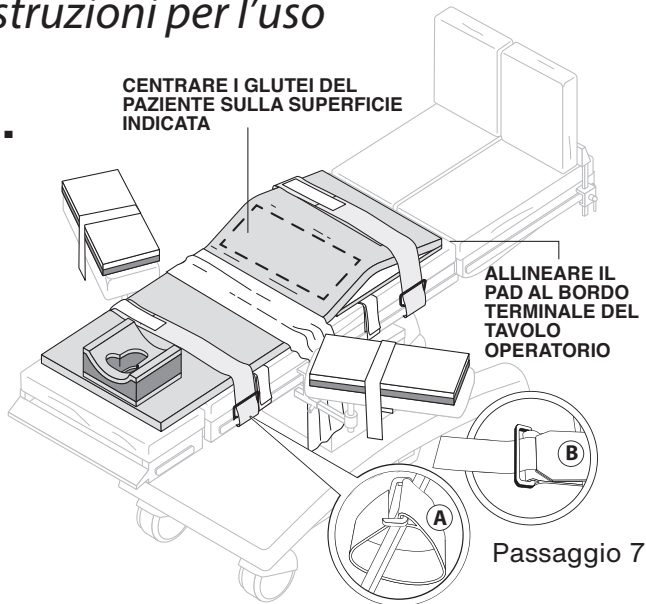

2.

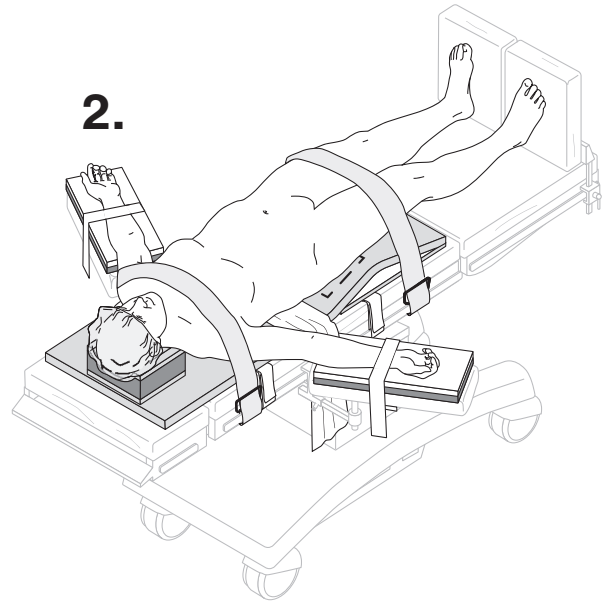

1. Iniziare con il tavolo senza inclinazione, quindi posizionare il Pink® Reverse T Pad sull'estremità del segmento centrale del tavolo operatorio, posizionando le cinghie bianche in velcro sul lato inferiore del Pink® Reverse T Pad. **IMPORTANTE: NON utilizzare alcuna copertura da tavolo, teleria, altri dispositivi di trasferimento o materiali tra il Pink® Reverse T Pad e la superficie del tavolo operatorio. Il Pink® Reverse T Pad deve essere a contatto diretto con la superficie del tavolo.** Le scritte "This side up" devono essere rivolte verso l'alto.
2. Attaccare le cinghie bianche in velcro del Pink® Reverse T Pad alle guide del letto chirurgico avvolgendo quelle inferiori attorno alle barre laterali del letto operatorio, e fissare le estremità del velcro l'una con l'altra.
3. Appoggiare il telino per il sollevamento sopra il Pad, centrandolo tra le cinghie di velcro, come mostrato. Il telino dovrebbe coprire solo la parte del materassino a contatto con schiena del paziente nella zona compresa tra le scapole ed il sacro.
4. Seguire il protocollo ospedaliero per l'intubazione. Quindi posizionare correttamente i glutei del paziente sulla parte anteriore della protuberanza, come mostrato nel diagramma 1.  
**IMPORTANTE: LA PELLE DEL PAZIENTE DEVE ESSERE IN DIRETTO CONTATTO CON IL MATERASSINO.** Utilizzare il telino incluso per sollevare e riposizionare con cura il paziente se necessario. Non trascinare il paziente sul materassino. Assicurarsi che il materassino rimanga sempre completamente piatto.
5. Appoggiare ciascun cuscinetto per il braccio con DermaProx™ su ciascun supporto. Posizionare il braccio del paziente in modo che il gomito ed il polso poggino comodamente sul cuscinetto.
6. Chiudere le cinghie dei cuscinetti per le braccia avvolgendole attorno ad entrambi i supporti degli arti, ai cuscinetti stessi ed al braccio del paziente. **ACCESSORIO OPZIONALE:** vedere le istruzioni per utilizzare correttamente i protettori da braccia One-Step. **IMPORTANTE: NON TUTTI I KIT DISPONGONO DI PROTEZIONI PER LE BRACCIA.**
7. Fissare la cinghia per il corpo come segue:
  - A. Posizionare il quadratino in velcro (della cinghia) attorno alla guida del tavolo e ancorarlo attraverso la fibbia della cinghia.
  - B. Ripetere il passaggio precedente sull'altro lato del tavolo. Unire le cinghie insieme.
8. Inclinare il tavolo e posizionare il paziente in sicurezza in anti-Trendelenburg.


### ATTENZIONE ⚠

1. Prima di utilizzare il Pink® Reverse T Pad, assicurarsi che il materassino sia fissato saldamente al tavolo operatorio e che quest'ultimo sia pulito e privo di impurità.
2. Seguire le politiche e le linee guida della struttura per la frequenza del monitoraggio dei pazienti. Verificare l'integrità della pelle e la corretta circolazione. Il prodotto deve essere utilizzato solo da un professionista medico autorizzato.
3. Prestare attenzione a proteggere il Pink Pad dall'esposizione a soluzioni per la preparazione dell'intervento.
4. Maneggiamento e stoccaggio: durante TUTTO il maneggiamento e lo stoccaggio, assicurarsi che il cuscinetto sia disteso. Non arrotolare o piegare il cuscinetto.

ACCESSORIO OPZIONALE PER IL Pink® Reverse T Pad

## Protezioni per il braccio One-Step Istruzioni per l'uso


1.

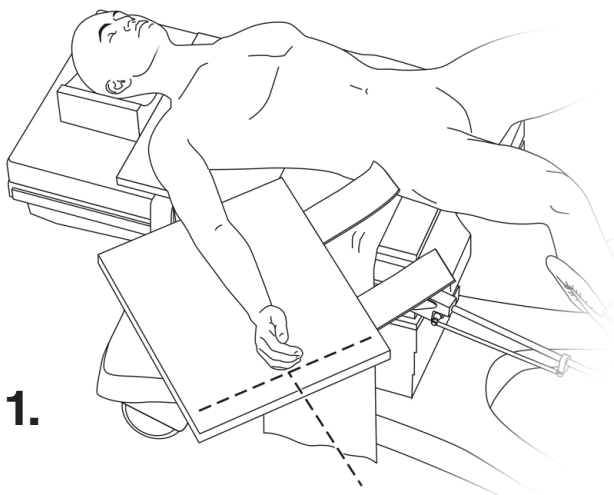

1. Posizionare la protezione per il braccio One-Step™ sotto il braccio del paziente, centrando lateralmente la protezione del braccio con le cinghie rivolte verso il basso e verso il busto del paziente.

Il Pad dovrebbe estendersi sopra il gomito e appena sotto la punta delle dita. La mano deve essere posizionata in una posizione anatomica naturale con i palmi rivolti verso l'interno in modo da non interferire con il nervo ulnare.

2.

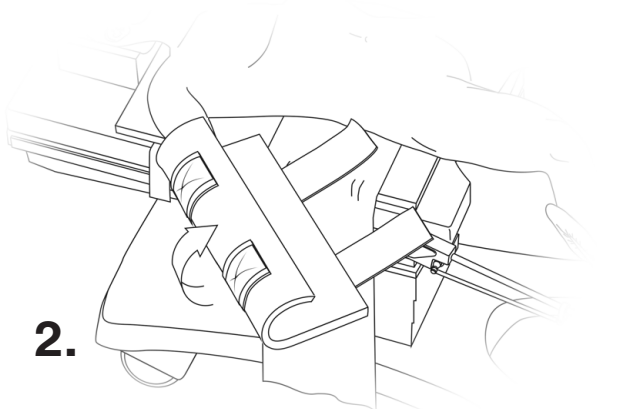


2. Avvolgere la parte esterna della protezione sul braccio.
3. Successivamente, avvolgere la parte rimanente della protezione sul braccio e fissare le cinghie alle corrispondenti toppe in Velcro™, come mostrato. Assicurarsi che la protezione del braccio One-Step™ sia saldamente avvolta attorno al braccio del paziente.

In questa fase, verificare il corretto allineamento del polso e delle dita. Inoltre, ispezionare i pulsossimetri, le linee intravenose, ecc. al fine di garantire il corretto posizionamento. L'accesso a questi parametri è semplice e ripetibile.

Ripetere i passaggi 1-3 per l'altro braccio.


3.

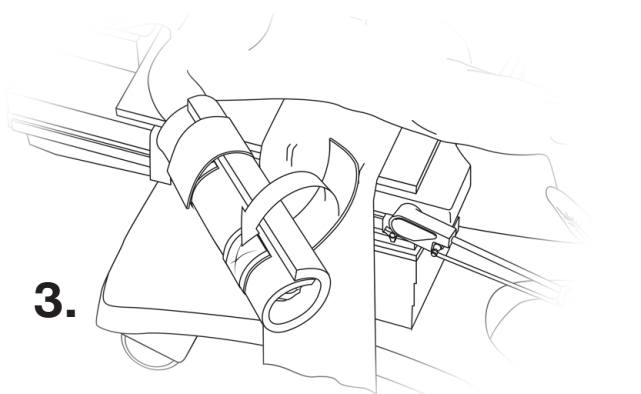

4. Una volta collocate le protezioni delle braccia One-Step™, avvolgere il telino per il sollevamento secondo il protocollo dell'ospedale, inserendolo tra il paziente ed Pink® Reverse T Pad.

I metodi per ripiegare il telino variano in base al protocollo ospedaliero. Il telo di sollevamento può essere nascosto sotto il paziente o sotto il materasso del tavolo operatorio. Il telino per il sollevamento non deve essere interposto tra il Pink T Reverse T Pad ed il tavolo operatorio.

4.

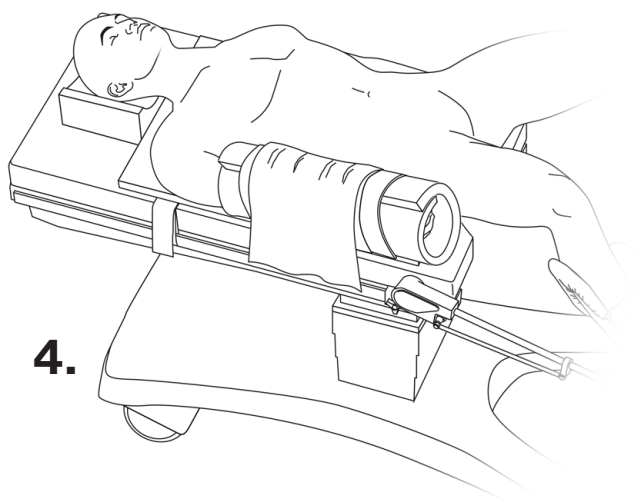

**XODUS MEDICAL**  
Making Surgery Safer™

702 Prominence Drive Tel: 724.337.5500  
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A. Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com | info@xodusmedical.com



MADE IN THE  
USA



FDA REGISTERED  
ISO 13485 CERTIFIED

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

LITIFUPP022 R0 12/9/19