

The Pink Hip Kit[®]

Sistema POSTLESS di posizionamento paziente

Istruzioni per l'uso

Modelli: HIP40615H & 40620HBL

Compatibile con Hana

1. Prima di utilizzare The Pink Hip Kit, verificare che il tappetino da tavolo operatorio sia disteso sul tavolo chirurgico stesso.

2. Posizionare il Pink Hip Pad [B] in contatto diretto con la superficie del tappetino del tavolo operatorio come indicato nella Figura 1.

3. Le cinghie Velcro bianche [B1] del The Pink Hip Pad dovrebbero essere poste con il materasso da tavolo con l'etichetta "This Side Up" rivolti verso l'alto.

4. Connettere ogni estremità delle cinghie Velcro bianche [C] alle rotaie del letto chirurgico facendo un giro sotto la rotaia e apponendo le estremità del Velcro insieme come si vede evidenziato nella Figura 1.

5. Posizionare la cinghia viola grande [B2] sotto il tavolo chirurgico mettendo l'estremità più lunga delle cinghie viola sotto il tavolo, quindi sovrapponendo l'estremità più lunga della cinghia all'estremità più corta della cinghia. Accertarsi di premere con fermezza la giunzione in velcro bianco collegando l'estremità più corta della cinghia all'estremità più lunga della stessa per fissarlo in posizione.


6. Sistemare il posizionatore per la testa [A] nella porzione della parte superiore del Pink Hip Pad [B] in una posizione adeguata per il posizionamento della testa del paziente.

7. Appoggiare il telo [D] di sollevamento sopra il Pad, centrato tra le cinghie bianche. Il telo di sollevamento dovrebbe coprire solo la area del Pad in contatto con la porzione lombare della schiena del paziente, tra la regione scapolare e sopra il sacrum.


8. Mettere le coperte per giunti sferici [G] sui giunti sferici, come indicato nella Figura 2.

9. Posizionare un tappetino grande [F] di supporto braccio sotto il braccio del paziente dal lato opposto all'anca oggetto di intervento. Mettere il braccio paziente sul supporto braccio con i palmi delle mani in alto secondo il protocollo di posizionamento ospedaliero, come da Figura 3 e fissando il braccio del paziente con una cinghia [E] al relativo supporto. Iniziare infusione i.v. oppure intubazione secondo il protocollo ospedaliero.

10. In caso di necessità riposizionare il paziente sul Pink Hip Pad[B] solo con il telo di sollevamento [D] fornito. Utilizzare lo stesso per sollevare con attenzione il paziente dal Pad e per riposizionarlo in base alle esigenze per un'applicazione sicura e corretta. Non trascinare il paziente sul Pad e assicurarsi che il Pad rimanga sempre piatto.

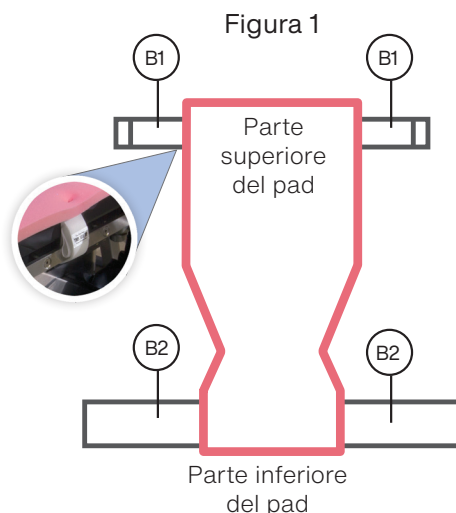

- A. Posizionatore per la testa (1)
- B. Materassino Pink Hip Pad™ (1)
 - B1. Cinghie bianche di Velcro (2)
 - B2. Cinghia viola grande di Velcro (1)
- C. Cinghie viola per corpo (2)
- D. Telo di sollevamento (1)
- E. Cinghie per braccio (2)
- F. Tappetini grandi per supporto braccio (2)
- G. Coperte per giunti sferici (2)
- H. Calzari (2)

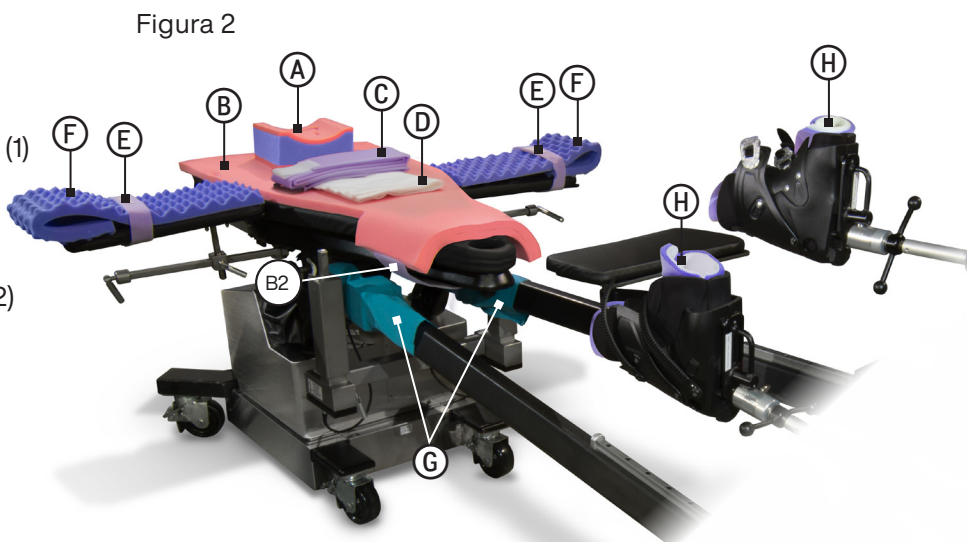

The Pink Hip Kit®

Sistema POSTLESS di posizionamento paziente

Istruzioni per l'uso

Modelli: HIP40615H &
40620HBL

Compatibile con Hana

11. Posizionare l'altro braccio sul petto del paziente sull'altro tappetino grande [F] in modo che il cuscinetto del braccio ammortizza il braccio stesso del paziente. Avvolgere il braccio come indicato nella Figura 3, e in conformità con il protocollo ospedaliero.

Figura 3



12. Istruzioni per assemblare le cinghie per corpo [C]:

- Posizionare il componente cinghia con il piccolo riquadro in Velcro intorno alla rotaia accessoria del tavolo operatorio attraverso la fibbia del cinturino come da Figura 4, Parte a.
- Ripetere il passaggio precedente sull'altro lato del tavolo con il componente della cinghia rimanente con il lato del gancio del Velcro rivolto verso il basso come da Figura 4, Parte b.
- Unire le cinghie per corpo [C] assieme in modo che la stessa passi sopra il braccio e il torace del paziente come indicato nella Figura 3.

13. Posizionare i piedi avvolti del paziente in ogni Boot da trazione e bloccare le cinghie di sicurezza.


Figura 4

SE IL KIT INCLUDE I CALZARI [H]


Seguire le istruzioni per l'uso dei calzari.

IMPORTANTE

- Posizionare la piega glutea del paziente allineata con l'estremità inferiore del Pink Hip Pad [B].
- Se il paziente presenta una possibile problematica anatomica durante una tentata distrazione, l'uso dell'artrogramma con aria potrebbe facilitare il processo di distrazione.
- Assicurarsi di seguire le indicazioni e le linee guida della struttura clinica circa le modalità di monitoraggio del paziente. Verificare l'integrità della pelle e la corretta circolazione. Il prodotto deve essere utilizzato solo da un professionista medico autorizzato.
- Il Pink Hip Kit è registrato con impiego monouso / mono paziente.
- Durante la manipolazione e la conservazione di il Pink Hip Kit, assicurarsi che il Pink Hip Pad sia piatto. Non rotolare o piegare.

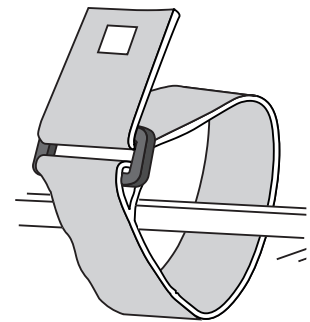

Parte a

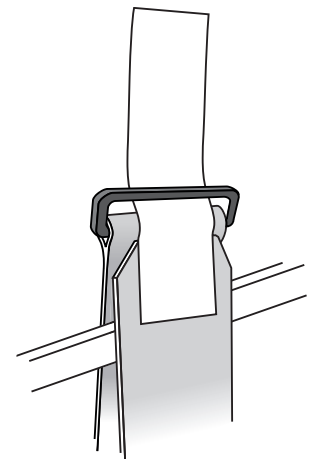

Parte b

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™

702 Prominence Drive
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555



xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

MADE IN THE
USA



FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands