


Brugsanvisning

Ekstensionsstøvleforing


40531H

Se din institutions protokoller for patientpositionering inden brug


1. Sørg for, at støvleforingen vender den rigtige vej.
Den syede kant skal flugte med patientens fodsål.
2. Åbn stropperne med velcrolukning, og lad den åbne støvleforing glide ned over patientens fod i den rigtige retning.
3. Placer støvleforingens sider rundt om foden, og fastgør med velcrolukningen. Foringen skal sidde tæt uden at hindre cirkulationen.
4. Placer foringen om den nederste del af læggen, og fastgør med den anden velcrolukning. Igen skal du sørge for ikke at stramme for meget.
5. Støvleforingen er nu fastgjort, og foden er klar til at blive placeret i ekstensionsstøvlen. Gentag trin 1-4 for den anden fod.

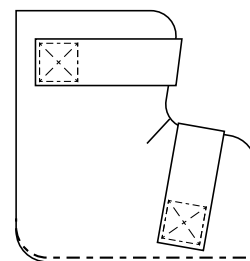


- 1 Den syede kant skal flugte med fodsålen.

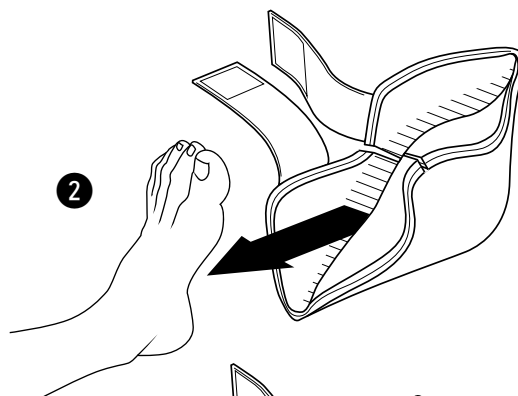


2

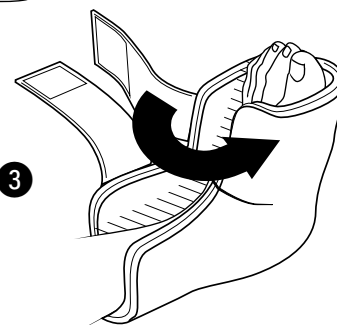

3

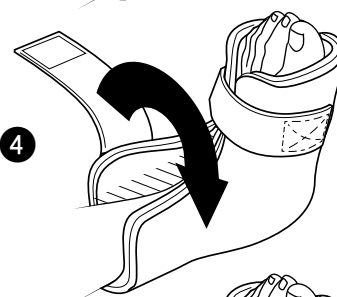

4

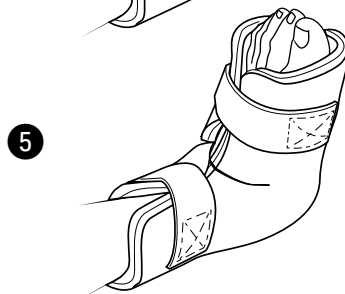

5



702 Prominence Drive
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED


xodusmedical.com/eifu

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

LITIFUPP046 R0 6/17/2021