


Gebruiksaanwijzing

Traction Boot Liners


40531H

Raadpleeg vóór gebruik de protocollen van uw instelling voor het positioneren van patiënt.


1. Bepaal de juiste oriëntatie van de bootliner. De gestikte rand ligt tegen de voetzool van patiënt.
2. Open de klittenbanden en schuif de open bootliner in de juiste richting over de voet van patiënt.
3. Wikkel de zijkanten van de bootliner in de juiste pasvorm en zet de klittenbandsluiting vast. De pasvorm moet nauwsluitend zijn zonder de bloedsomloop te belemmeren.
4. Omwikkel het onderste deel van de kuit en zet de andere klittenbandsluiting vast. Zorg er ook nu voor dat het niet te strak zit.
5. De bootliner is nu vastgezet en de voet kan in de tractieschoen worden geplaatst. Herhaal stap 1-4 voor de andere voet.

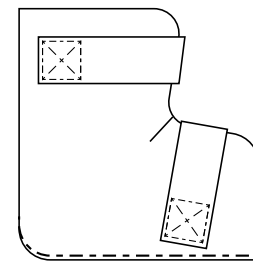


- 1 De gestikte rand ligt tegen de voetzool van patiënt.

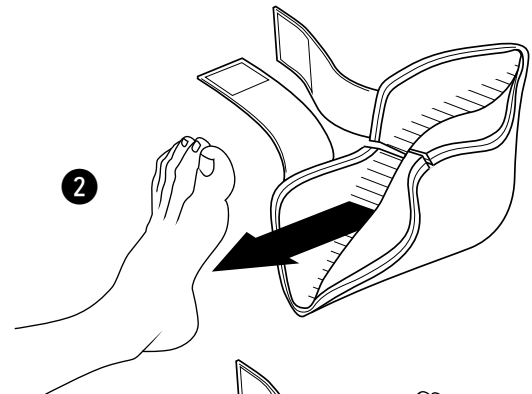


2

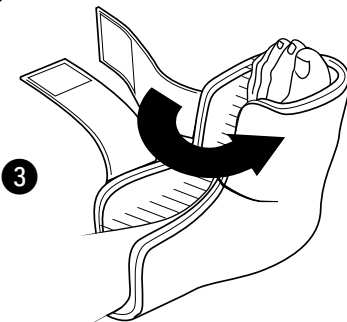

3

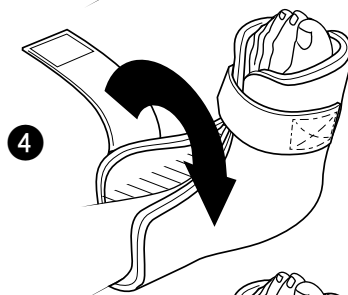

4

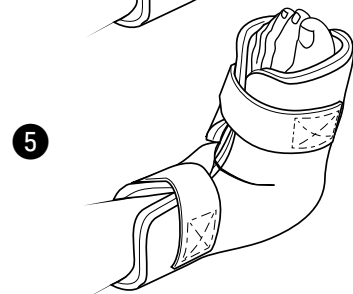

5



702 Prominence Drive
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED


xodusmedical.com/eifu

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

LITIFUPP055 R0 6/17/2021